



Muestra de pelo para análisis de ADN

Número de Microchip

Solicitante:

Propietario:

Haras:

Raza: Sexo:

Nombre:

No usar

Importante:

Es obligatorio completar los datos solicitados.

Para la toma de la muestra, siga las instrucciones del reverso del sobre.

Ante cualquier duda, comuníquese con el laboratorio:
Tel. / Fax: 011-771-1366/1982
de 8:00 a 14:00
E-Mail: infolab@sra.org.ar

Instructivo para la toma de la muestra de pelo

- Identifique correctamente el animal.
- Limpie la cola del mismo.
- Separe un mechón de 30 - 40 pelos de la crin o del nacimiento de la cola.
- Envuélvelo en el dedo índice y tire.
- Verifique la presencia de bulbos pilosos (pelo de raíz)
- Guarde la muestra y cierre el sobre.



Muestra de pelo para análisis de ADN

Número de Microchip

Solicitante:

Propietario:

Haras:

Raza: Sexo:

Nombre:

No usar

Importante:

Es obligatorio completar los datos solicitados.

Para la toma de la muestra, siga las instrucciones del reverso del sobre.

Ante cualquier duda, comuníquese con el laboratorio:
Tel. / Fax: 011-771-1366/1982
de 8:00 a 14:00
E-Mail: infolab@sra.org.ar

Instructivo para la toma de la muestra de pelo

- Identifique correctamente el animal.
- Limpie la cola del mismo.
- Separe un mechón de 30 - 40 pelos de la crin o del nacimiento de la cola.
- Envuélvelo en el dedo índice y tire.
- Verifique la presencia de bulbos pilosos (pelo de raíz)
- Guarde la muestra y cierre el sobre.